



WASH-SENSOR U

Sistema di prova chimico per la verifica dell'efficacia pulente delle vasche ad ultrasuoni.

Impiego

Sistema di prova pratico e semplice da utilizzare di routine per il monitoraggio del potere pulente degli apparecchi a ultrasuoni e dei termodisinfettori per strumenti medici.

Prodotto	Codice	Confezione	Conservazione	Durata
<i>TEST indicativo Wash Sensor-U</i>	<i>7137</i>	<i>10 pezzi</i>	<i>In luogo asciutto a temperatura ambiente</i>	<i>4 anni dalla data di produzione</i>


Applicazione / Esecuzione

Serrare un **Wash-Sensor U** con una pinzetta autobloccante e posizionarlo sul fondo del cestello in rete in modo che l'indicatore rimanga in posizione verticale.

Avviare il programma di pulizia della vasca ultrasuoni per 5 minuti.

Valutazione

Trascorsi i 5 minuti estrarre il test **Wash-Sensor U** e verificare la completa rimozione del deposito di prova rosso.

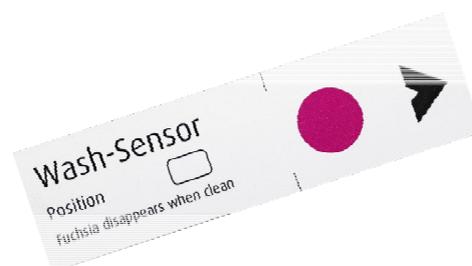

Non trattato
o risultato critico



Risultato di pulizia
non sufficiente



Risultato
di pulizia ottima

Sostituisce Wash-Check U e Wash-Check WD

