



SMU-LC

Nuovo test monouso comparato a Helix Test per autoclavi a vapore classe B.

Utilizzo:

test monouso per sterilizzatrici a vapore con vuoto frazionato per verificare la penetrazione del vapore nei corpi cavi.

Procedura:

Inserire il test SMU-LC nella camera di sterilizzazione.
Avviare il programma per Helix Test (134 °C per 3,5 minuti).



Quando il ciclo è terminato estrarre il test, strappare la striscia e lasciare raffreddare brevemente.

Estrarre l'indicatore chimico e verificare la variazione di colore.



Risultati:



Test di funzionamento corretto:
Il colore da blu è virato a nero



Test di funzionamento non idoneo:
Il colore da blu è virato a blu-verde

Documentazione:

Estrarre l'indicatore e incollarlo sulla scheda riepilogo.
Completare la documentazione con data, n° del ciclo e relative firme.

Confezione: 10 pz.

Codice: 7171

Stoccaggio: in zona asciutta e temperatura ambiente

Scadenza: 18 mesi dalla data di produzione

Conforme alle norme EN ISO 11140 - 1 (classe 2) - EN 867-4 EN 867-5

Per maggiori informazioni:

De Marco srl • Via Tajani, 9 • 20133 Milano

Tel.: +39 02719065 • +39 0270100417

Fax: +39 02733109

demarco@demarco.biz • www.demarco.biz



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =